

Manual de pré-requisitos de instalação do equipamento KaVo OP3D Vision



Embalagem

Observe as medidas das embalagens (Comprimento X Largura X Altura):


- Caixa 01: 1,23m x 1,35m x 1,83m / Peso 367,3kg

É de responsabilidade do comprador: disponibilizar as caixas próximo ou na sala onde o equipamento será instalado. Caso estejam em andares diferentes ou em áreas de difícil acesso, as caixas não serão transportadas e/ou transferidas para o local da instalação pelo técnico instalador.

Sala

A sala onde o equipamento será instalado, deve conter os seguintes parâmetros:

- Espaço mínimo para instalação: 2,7m x 2,30m x 2,40 (largura x profundidade x altura);
- Duto para passagem de cabo ethernet entre o equipamento e o computador de aquisição;
- Ar condicionado deve estar devidamente instalado para refrigeração da sala;
- A Parede deve ser baritada;
- Peso do equipamento: 231,3 kg.

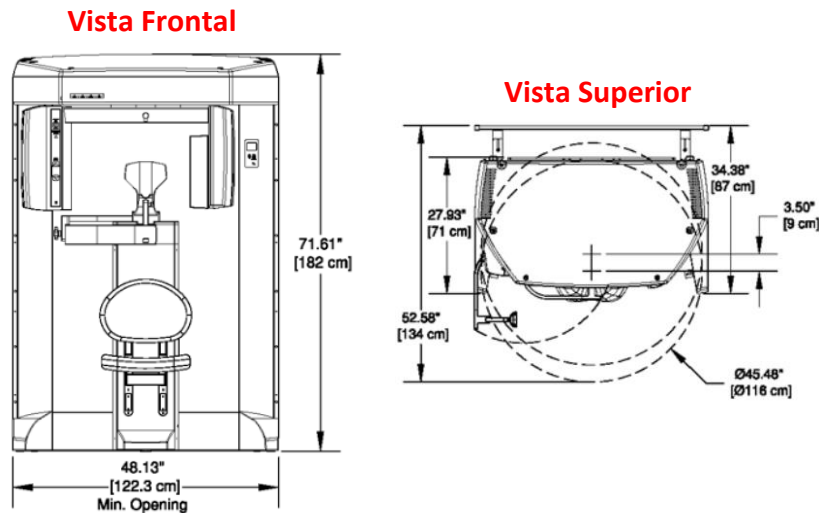

Medidas em polegadas e centímetros

Elétrica

A rede elétrica deve seguir o seguinte parâmetro:

- Linha individual;
- Verificar com o fabricante do nobreak a configuração de um disjuntor;
- Verificar com o fabricante do nobreak a configuração do fio elétrico;
- Aterramento dedicado para o equipamento;

Nobreak (Não fornecido com o produto)

O nobreak deve conter os parâmetros abaixo:

- Potência: 3 KVA;
- Tensão de Saída: 220 Volts;
- Com dupla conversão, Online;
- Com Transformador Isolador;
- Tomada 20A (saída);

Computador de laudo (Não fornecido com o produto)

O computador de laudos é onde são realizadas as impressões e análises nas imagens e pode ser separado do computador de aquisição. É um item de extrema importância, pois falhas neste podem paralisar o processo de diagnóstico. Com isso, sugerimos que este seja novo e com as especificações abaixo:

Sistema Operacional 64-Bit	Windows 7, 8.1 e 10 Professional/ Enterprise
Memória RAM	16GB ou mais
Processador	Core i7 ou superior
Disco Rígido (HD)	1TB ou superior
DVD-ROM	Drive de DVD para instalação dos softwares
Placa de Vídeo	NVIDIA com 2 Gb dedicado
Placa de Rede (Internet\ Rede local)	Gigabit Ethernet (1000Mb/s)
USB	4x Portas
Monitor*	24 polegadas 1920x1200 ou superior
Fonte	550W

* Para a execução de um trabalho otimizado recomenda-se esta configuração.

É de responsabilidade do comprador disponibilizar acesso à internet junto com o computador de laudos, para que seja feita a ativação do software, acesso remoto do técnico para instalação, configuração e comunicação com o equipamento, configuração ou reparo do software.

Data de Instalação

Após a confirmação por e-mail dos itens acima, será firmada a data de instalação com o cliente. Para confirmar a data, nos responda o e-mail enviado. Caso necessário reagendar a data de instalação já confirmada e/ou técnico identificar que a sala não está dentro dos parâmetros acima que impeçam a conclusão da instalação, todos os custos referente à remarcação de passagem aérea, multas por quebra de agenda com hotel ou locação de automóvel entre outros, será de responsabilidade do cliente.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Instalação:

0800 774 7480

instalacao.kavo@kavokerr.com